



## CM Ø 5.5 mm

Cónico



### CÓDIGOS

| Diámetro | Longitud | Código |
|----------|----------|--------|
| Ø 5.5 mm | 5 mm     | 26131  |
|          | 6 mm     | 26132  |

### ESPECIFICACIONES

|               |           |
|---------------|-----------|
| Longitud      | 5/6 mm    |
| Diámetro      | 5.5 mm*   |
| Encaje        | 2.5 mm    |
| Profundidad   | 3.5 mm    |
| Rosca Interna | 1.8 mm ST |
| Ángulo        | 11.5°     |
| Ápice         | 3.5 mm    |

### CARACTERÍSTICAS

- Implante cónico con encaje Cone Morse;
- Implante con montador;
- Indicado para rehabilitación tardía;
- Indicado para regiones posterior superior e inferior;
- Seguridad para rehabilitaciones múltiples;
- Superficie tratada con chorreado y ataque ácido alternados;
- Cuerpo totalmente cónico, proporcionando mejor equilibrio entre hueso y diseño del implante;
- Posibilita instalación en cualquier densidad ósea: tipo I, II, III y IV;\*;
- Para instalación, podrá utilizar torquímetro directo o torquímetro acoplado con la llave prolongadora. Otra posibilidad de instalación es la aplicación de las llaves de hexágono interno directo en el montador, realizando así torque interno, pudiendo realizar instalación manual o contra-ángulo;
- Utilizar componente ST;
- Acompaña cover 0 mm ST;
- Instalación cover: Llave Hexagonal nº 7 - 1.17 mm;
- Rotación de perforación: 200-300 rpm;
- Rotación de instalación: 20 rpm;
- Torque para instalación sugerido de hasta 60 Ncm.



\*Para implantes con Ø 5.5 mm de longitudes 5 mm /6 mm, la rosca interna es de 1.8 mm, sin embargo, su tornillo es específico debido a su longitud diferenciada. Para este implante, utilizar componentes de la Línea ST.

## SECUENCIA DE FRESAS

|             | Tipo óseo | Implante<br>Ø Diámetro | FL<br>2.0 x 5 | FC<br>Ø 3.5 | FC<br>Ø 4.0 | FC<br>Ø 4.5 | FC<br>Ø 5.0 | FC<br>Ø 5.5 |
|-------------|-----------|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| FRESADO     | I<br>II   | Ø 5.5                  | ►             | ►           | ►           | ►           | ►           | ►           |
| SUB-FRESADO | III<br>IV | Ø 5.5                  | ►             | ►           | ►           | ►           | ►           | ■           |

► Necesario ■ Opcional

FL - Fresa Lanza | FC - Fresa Cónica

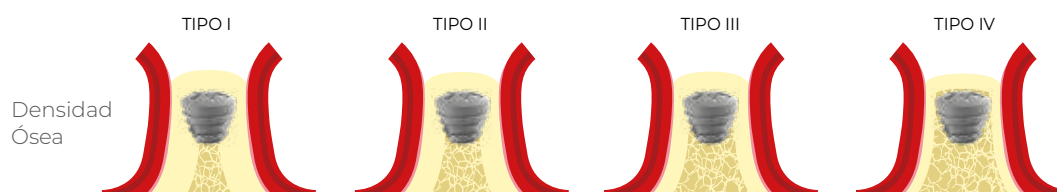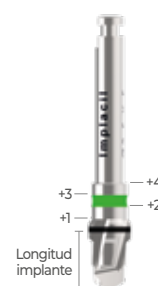

## PROLONGADORES PARA INSTALACIÓN (torque externo montador)

| Prolongador de Carraca Corto | Prolongador de Carraca Medio | Llave Adaptadora |
|------------------------------|------------------------------|------------------|
| 15 mm                        | 22,8 mm                      | 36 mm            |
| 19880                        | 19743                        | 19804            |

## LLAVES INSTALACIÓN (torque interno montador)

| Carraca Ø 4.0 | Motor Ø 4.0 |
|---------------|-------------|
| Corta         | Único       |
| 23748         | 25096       |

Llaves utilizadas para implantes de hexágono interno, para instalación del implante Cone Morse con montador, no deberá remover el montador.



### COVER CM

0 mm (acompaña) ST 21025



## LLAVE PARA INSTALACIÓN COVER

### Llave Hexagonal nº 7 - 1.17mm

|             |         |       |
|-------------|---------|-------|
| Llave Corta | 19,3 mm | 20626 |
| Llave Media | 23 mm   | 18685 |
| Llave Larga | 28 mm   | 20619 |