


CARACTERÍSTICAS

- » Implante cónico con encaje Hexagonal Exterior;
- » Indicado para rehabilitación inmediata o tardía;
- » Para casos unitarios y seguridad para la rehabilitación de implantes múltiples;
- » Permite la instalación en cualquier densidad ósea: tipo I, II, III y IV;*;
- » Superficie tratada con chorreado y grabado ácido alternados;
- » Diseño revolucionario de las roscas trapezoidales acelera la condensación ósea, gracias a la perfecta combinación de la conicidad del implante y formato de las espiras;
- » Microespiras (0,25 mm) que mejoran su adaptación cervical;
- » Puede instalarse con llave de carraca (manual) o de contraángulo (motor);
- » Viene con cover;
- » Instalación: Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm;
- » Rotación:
 - » Perforación: 800-1.200 rpm;
 - » Instalación: 20 rpm;
- » Par para instalación sugerido de hasta 60 Ncm.

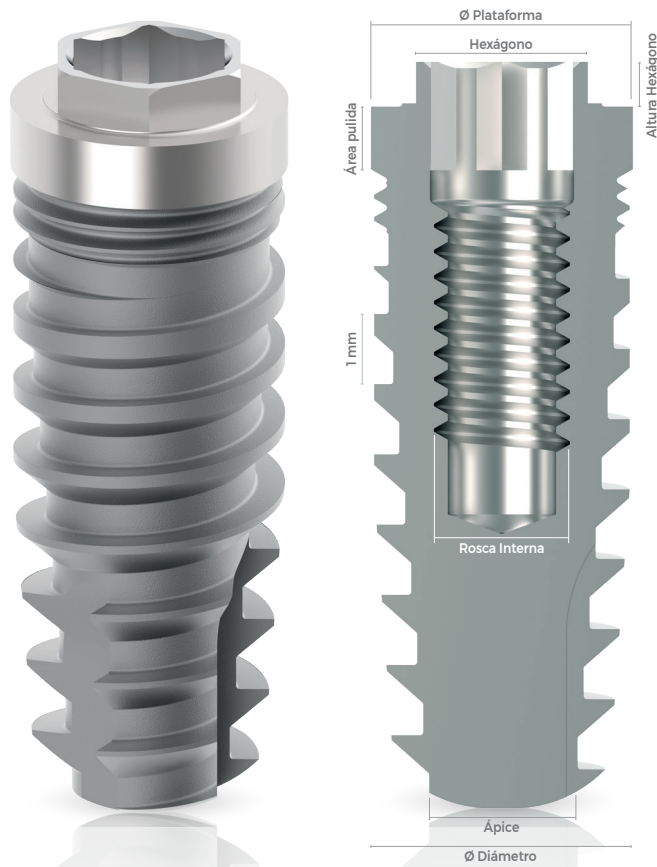

CÓDIGOS


Longitud	Código		
	Ø 3,5 mm	Ø 4,0 mm	Ø 5,0 mm
7 mm	22063	22075	22087
9 mm	22065	22077	22090
11 mm	22067	22079	22092
13 mm	22069	22081	22094
15 mm	220712	22083	22096

LLAVES INSTALACIÓN



Carraca Ø 3,5			Motor Ø 3,5
Corta	Promedio	Larga	Único
23746	24112	24618	25089

Para implantes Ø 3,5.

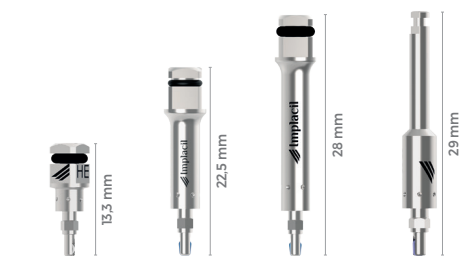

Carraca Ø 4,0			Motor Ø 4,0
Corta	Promedio	Larga	Único
23748	23139	24615	25096

Para implantes Ø 4,0 y Ø 5,0.

ESPECIFICACIONES

Longitud	7 9 11 13 15 mm		
Diámetro	3,5 mm	4,0 mm	5,0 mm
Plataforma	3,5 mm	4,0 mm	5,0 mm
Ápice	2,0 mm	2,8 mm	3,2 mm
Hexágono	2,4 mm	2,7 mm	2,7 mm
Altura Hexágono	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Rosca Interna	M 1,8	M 2,0	M 2,0
Área Pulida	1,7 mm	1,7 mm	1,7 mm

COVER/ TAPA IMPLANTE

3,5	204194
4,0	24976
5,0	24983

LLAVE PARA INSTALACIÓN COVER

Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm		
Clave Corta	19,3 mm	20626
Clave Promedio	23 mm	18685
Llave Larga	28 mm	20619

*Indicación de aplicación ósea según la Clasificación de Lekholm y Zarb.

**Para realizar la preparación del lecho para implantes cónicos, se debe usar la fresa correspondiente a la longitud del implante previsto, respetando la secuencia ilustrada, según el tipo de hueso.

LH - Fresa Lanza Helicoidal | FC - Fresa Cónica | ES - Escariador/oseodensificador

The diagram shows four cross-sectional views of dental implants in the jawbone, labeled TIPO I, TIPO II, TIPO III, and TIPO IV. Each type shows a different design of the implant body and its integration with the bone and soft tissue.

Carga inmediata	Par: 35 Ncm mínimo / 60 Ncm máximo.	Finalización tras la osteointegración. Tiempo mínimo: 12 semanas.
Carga tardía	Par sugerido: 60 Ncm.	