

PRÓTESIS OVERDENTURE

APLICACIÓN

- » Componente esférico individual con diversas alturas de cintas para overdentures (sobredentadura);
- » Pilar sólido, cuerpo único;
- » También indicado para paciente con dificultad de higiene;
- » Necesita paralelismo;
- » No usado como elemento unitario;
- » Instalación: Llave O'ring Hexagonal n.º 2 - 2,5 mm;
- » Par de instalación: 25 Ncm.

COMPOSICIÓN DEL ENVASE

- » Componente O'ring;
- » Cápsula Metálica Estándar (con goma);
- » Anillo Plástico;
- » Cápsula Plástica.



VEA LA
ORIENTACIÓN
DE USO.



CM

Cinta	Ø Diámetro 4,0
Ø 0,8 mm	24280
Ø 1,5 mm	24297
Ø 2,5 mm	24303
Ø 3,5 mm	24310
Ø 4,5 mm	24327
Ø 5,5 mm	24334

Para implantes de 7 mm a 17 mm.

CM/CM AR/CM 11,5° compatibles.

SECUENCIA DE APLICACIÓN

IMPLANTE	CICATRIZACIÓN	TRANSFER	ANÁLOGO D/Y	COMPONENTE	INSTALACIÓN	COMPONENTE	CÁPSULA
Maestro CM AR Due Cone CM AR Veloce CM AR	Cicatrizador	Transfer CM AR Mold. Abierto Cód. 228930 Transfer CM AR Mold. Cerrado Cód. 228923	CM AR Para implantes de 7 mm a 17 mm Cód. 31509	O'Ring	Llave O'ring n.º 2 Cód. 18630 25 Ncm	Anillo Cápsula Metálica	Plástica

Para implantes de 5 mm y 6 mm de longitud no se deben aplicar componentes O'ring.