


APLICACIÓN

- » Indicación para casos múltiples;
- » Prótesis fijas y protocolos en general;
- » El conjunto del componente y los accesorios requiere una altura interoclusal aproximada de 4,8 mm, debiendo considerarse también el volumen metalocerámico según la planificación y ejecución protésica;
- » El componente angulado de 17° o 30° permite corregir la angulación de los implantes;
- » Instalación Mini Cónico Recto: Llave Cónico/Estético Mini Cónico - n.º 5;
- » Instalación Mini Cónico Angulado/ Casquillo/Tornillo del Transfer de Moldeador Abierto: Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm;
- » Instalación Transfer Mini Cónico Moldeador Cerrado: Llave Fricción n.º 3;
- » Par de instalación: 20 Ncm;
- » Par de instalación del casquillo: 10 Ncm.

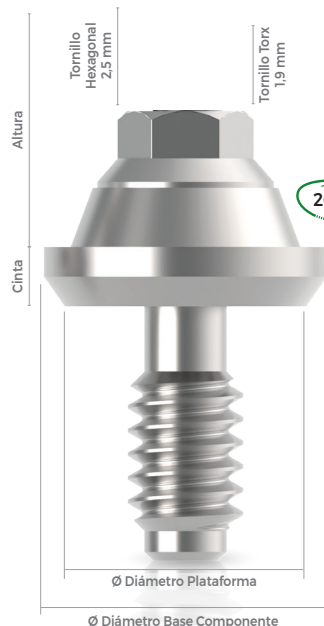

HE

Plataforma	*Ø 3,5	Ø 4,0	Ø 5,0
Cinta	1 mm	204439	2745
	2 mm	204453	2752
	3 mm	204477	2769

Para implantes de 7 mm a 15 mm.
Diámetro del componente Ø 4,8 mm.

HE ST

Cinta	Ø Diámetro Plataforma
1 mm	214001
2 mm	214018
3 mm	213998

Para implantes de 5 mm a 6 mm.
Diámetro del componente Ø 4,8 mm.

SECUENCIA DE APLICACIÓN

TIPO	INSTALACIÓN	CICATRIZACIÓN/PROVISIONAL	TRANSFER ANALÓGICO	TRANSFER DIGITAL EXOCAD®	ANÁLOGO D/Y	CASQUILLO	INSTALACIÓN CASQUILLO	REPOSICIÓN
Recto Múltiple	Llave n.º 5 Promedio Cód. 18661  20 Ncm	Tapa de Cicatrización Cód. 18548 	Transfer Mold. Abierto Rotacional Cód. 13512 	Rotacional Cód. 30783 	Rotacional Cód. 30880 	Casquillo Base Cromo Rotacional (Laboratorio) Cód. 27434 10 Ncm 	Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm Corta Cód. 20626 Promedio Cód. 18685 Larga Cód. 20619  10 Ncm	Tornillo Casquillo (Atornillado) Tornillo Hexagonal 1,17 mm Cód. 4787 Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm 
	Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm Corta Cód. 20626 Promedio Cód. 18685 Larga Cód. 20619  20 Ncm	Casquillo Titanio Rotacional (Provisional) Cód. 18302 10 Ncm 	Transfer Mold. Cerrado Rotacional Cód. 4282 			Casquillo Plástico Rotacional (Laboratorio) Cód. 17749 10 Ncm 		Tornillo Torx T6 1,4x2,0 mm Cód. 30129 Llave Torx T6 
Angulado Múltiple						Pilar Base T Rotacional (CAD/CAM MetalFree) Cód. 25498 10 Ncm 		Tornillo Trabajo Casquillo Cód. 24686 Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm 

R - Rotacional | ST - Implantes de 5/6 mm | D/Y - Digital o Yeso.

La Selección de componente para el Hexágono Externo debe seguir la misma plataforma que el implante instalado. Para implantes de Ø 3,3 y Ø 3,5, será de Ø 3,5; para implantes de Ø 3,75 y Ø 4,0, será de Ø 4,0 (Ø 4,1 Brånemark); para Ø 4,75 y Ø 5,0, será de Ø 5,0, como se muestra en la tabla "Plataforma Protésica" de la página 43.
*Para implantes HE Ø 3,3 y Ø 3,5 fabricados antes de oct. de 2015, componente especial con tornillo de 1,6 mm. Nueva línea Ø 3,3 y Ø 3,5 con tornillo de 1,8 mm.
Casquillo titanio, casquillos plásticos, Base Cromo y Pilar digital Base T vienen con tornillo hexagonal de 1,17 mm. El tornillo Torx debe adquirirse por separado.




MINI CÓNICO ANGULADO

PRÓTESIS ATORNILLADA

APLICACIÓN

- » Indicación para casos múltiples;
- » Prótesis fijas y protocolos en general;
- » El componente angulado de 17° o 30° permite corregir la angulación de los implantes;
- » El conjunto del componente y los accesorios requiere una altura interoclusal aproximada de 4,8 mm, debiendo considerarse también el volumen metalocerámico según la planificación y ejecución protésica;
- » La cinta de angulación también debe tenerse en cuenta en la planificación. Para componentes de 17°, considerar una cinta mínima de angulación de 2 mm y para 30°, cinta mínima de 3 mm;
- » Instalación Mini Cónico Angulado/Casquillo/Tornillo del Transfer de Moldeador Abierto: Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm;
- » Instalación Transfer Mini Cónico Moldeador Cerrado: Llave Fricción n.º 3;
- » Par de instalación: 20 Ncm;
- » Par de instalación del casquillo: 10 Ncm.

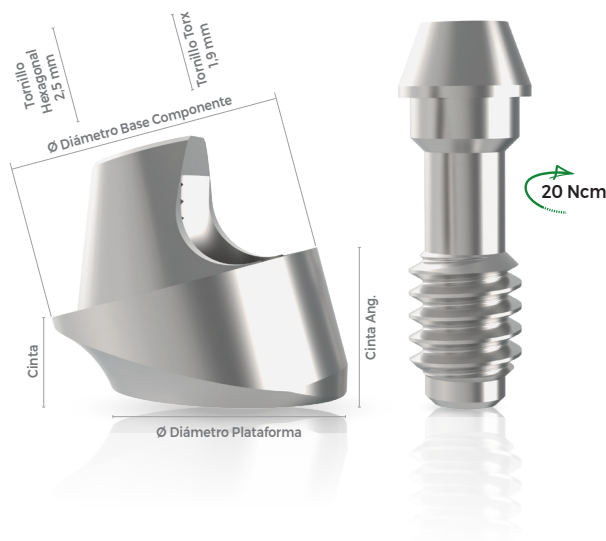

HE ANGULADO

Ø Diámetro Plataforma	*Ø 3,5	Ø 4,0	Ø 5,0
Cinta	2 mm	204392	20503
Cinta Ángulo 17°	2,5 mm	204415	21951
Cinta	3 mm	21951	21340
Cinta Ángulo 30°	3,2 mm		

Para implantes de 7 mm a 15 mm. Diámetro del componente Ø 4,8 mm.

SECUENCIA DE APLICACIÓN

TIPO	INSTALACIÓN	CICATRIZACIÓN/PROVISIONAL	TRANSFER ANALÓGICO	TRANSFER DIGITAL EXOCAD®	ANÁLOGO D/Y	CASQUILLO	INSTALACIÓN CASQUILLO	REPOSICIÓN
Recto Múltiple	Llave n.º 5 Promedio Cód. 18661  20 Ncm	Tapa de Cicatrización Cód. 18548 	Transfer Mold. Abierto Rotacional Cód. 13512 	Rotacional Cód. 30783 	Rotacional Cód. 30880 	Casquillo Base Cromo Rotacional (Laboratorio) Cód. 27434 10 Ncm 	Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm Corta Cód. 20626 Promedio Cód. 18685 Larga Cód. 20619 10 Ncm 	Tornillo Casquillo (Atornillado) Tornillo Hexagonal 1,17 mm Cód. 4787 Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm 
Angulado Múltiple	Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm Corta Cód. 20626 Promedio Cód. 18685 Larga Cód. 20619 20 Ncm 	Casquillo Titano Rotacional (Provisional) Cód. 18302 10 Ncm 	Transfer Mold. Cerrado Rotacional Cód. 4282 			Casquillo Plástico Rotacional (Laboratorio) Cód. 17749 10 Ncm 		Tornillo Torx T6 1,4x2,0 mm Cód. 30129 Llave Torx T6 
						Pilar Base T Rotacional (CAD/CAM MetalFree) Cód. 25488 10 Ncm 		Tornillo Trabajo Casquillo Cód. 24686 Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm 

R - Rotacional | ST - Implantes de 5/6 mm | D/Y - Digital o Yeso.

La Selección de componente para el Hexágono Externo debe seguir la misma plataforma que el implante instalado. Para implantes de Ø 3,3 y Ø 3,5, será de Ø 3,5; para implantes de Ø 3,75 y Ø 4,0, será de Ø 4,0 (Ø 4,1 Brånemark); para Ø 4,75 y Ø 5,0, será de Ø 5,0, como se muestra en la tabla "Plataforma Protésica" de la página 43.
*Para implantes HE Ø 3,3 y Ø 3,5 fabricados antes de oct. de 2015, componente especial con tornillo de 1,6 mm. Nueva línea Ø 3,3 y Ø 3,5 con tornillo de 1,8 mm.
Casquillo titano, casquillos plásticos, Base Cromo y Pilar digital Base T vienen con tornillo hexagonal de 1,17 mm. El tornillo Torx debe adquirirse por separado.