


APLICACIÓN

- » Indicación para casos unitarios;
- » Los pilares Base T son componentes protésicos usados para sistemas CAD/CAM. Permiten fabricar pilares cerámicos personalizados para una amplia gama de soluciones individualizadas;
- » La línea Base T también cuenta con el sistema Transfer Digital para implante o Transfer Digital Base T para copiar el Base T, que ofrece una calidad de superficie superior y una geometría única para obtener resultados de escaneado de alta precisión.
- » Instalación Base T: Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm;
- » Par de instalación: 20 Ncm;
- » Para uso en Exocad® haga la descarga en nuestro sitio web.



CONOZCA MÁS

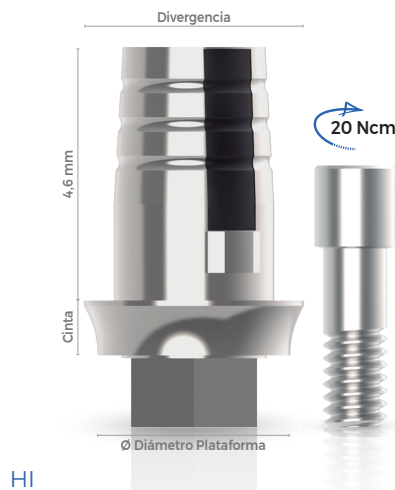

HI

Cinta	Ø 3,5	Ø 4,0
1 mm	24524	24530
2 mm	24526	245326
3 mm	24528	24534
Altura	4,6 mm	4,6 mm
Divergencia	Ø 4,0	Ø 5,0
Descripción	Small	Large

Para implantes de 7 mm a 15 mm.



TRANSFER DIGITAL
IMPLANTE HI

Descripción	
HI Ø 3,5 AR	30777
HI Ø 4,0 AR	30779
HI Ø 5,0 AR	30781

TRANSFER
DIGITAL BASE T

Descripción	
Base T Ø 3,5	31683
Base T Ø 4,5	31784

SECUENCIA DE APLICACIÓN – ESCaneo INTRAORAL

IMPLANTE	CICATRIZADOR/ PROVISIONAL	TRANSFER DIGITAL	INSTALACIÓN	ANÁLOGO D/Y	COMPONENTE	INSTALACIÓN
Due Cone HI Veloce HI	Cicatrizador Ucla Titanio (Provisional)	Transfer Digital HI HI40	Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm Corta Cód. 20626 Promedio Cód. 18685 Larga Cód. 20619 20 Ncm	Análogo HI	Base T 20 Ncm	Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm Corta Cód. 20626 Promedio Cód. 18685 Larga Cód. 20619 20 Ncm

SECUENCIA DE APLICACIÓN – ESCaneo EXTRAORAL

IMPLANTE	CICATRIZADOR/ PROVISIONAL	TRANSFER ANALÓGICO	ANÁLOGO D/Y	TRANSFER DIGITAL	COMPONENTE	INSTALACIÓN
Due Cone HI Veloce HI	Cicatrizador Ucla Titanio (Provisional)	Transfer Moldeador Abierto Transfer Moldeador Cerrado	Análogo HI	Transfer Digital HI HI40	Base T 20 Ncm	Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm Corta Cód. 20626 Promedio Cód. 18685 Larga Cód. 20619 20 Ncm

AR – Antirrotacional | D/Y – Digital o Yeso.

La Selección de componentes para Hexágono Interno debe seguir la misma plataforma que el implante instalado. Para implantes de Ø 3,3 y Ø 3,5, será de Ø 3,5; para implantes de Ø 3,75, Ø 4,0 y Ø 4,3, será de Ø 4,0, como se muestra en la tabla "Plataforma Protésica" de la página 67.