




PRÓTESIS CEMENTADA/ATORNILLADA

APLICACIÓN

- » Indicación para casos unitarios;
- » Los pilares Base T son componentes protésicos usados para sistemas CAD/CAM. Permiten fabricar pilares cerámicos personalizados para una amplia gama de soluciones individualizadas;
- » La línea Base T también cuenta con el sistema Transfer Digital para implantar o Transfer Digital Base T para copiar el Base T, que ofrece una calidad de superficie superior y una geometría única para obtener resultados de escaneo de alta precisión.
- » Instalación Base T: Llave Hexagonal n.º 7 – 1,17 mm;
- » Par de instalación: 20 Ncm;
- » Para uso en Exocad® haga la descarga en nuestro sitio web.



CONOZCA MÁS

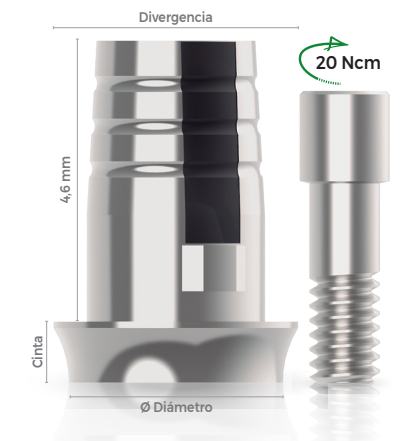

HE

Cinta	Ø 3,5	Ø 4,0
1 mm	24512	245180
2 mm	24514	24520
3 mm	24516	24522
Altura	4,6 mm	4,6 mm
Divergencia	Ø 4,0	Ø 5,0
Descripción	Small	Large

Para implantes de 7 mm a 15 mm.



TRANSFER DIGITAL IMPLANTE HE

Descripción	
HE Ø 3,5 AR	30771
HE Ø 4,0 AR	30773
HE Ø 5,0 AR	30775

TRANSFER DIGITAL BASE T

Descripción	
Base T Ø 3,5	31683
Base T Ø 4,5	31784

SECUENCIA DE APLICACIÓN – ESCaneo INTRAORAL

IMPLANTE	CICATRIZADOR/ PROVISIONAL	TRANSFER DIGITAL	INSTALACIÓN	ANÁLOGO D/Y	COMPONENTE	INSTALACIÓN
Due Cone HE Veloce HE	Cicatrizador Ucla Titanio (Provisional) 30 Ncm	Transfer Digital HE 	Llave Hexagonal n.º 7 – 1,17 mm Corta Cód. 20626 Promedio Cód. 18685 Larga Cód. 20619 	Análogo HE 	Base T 20 Ncm	Llave Hexagonal n.º 7 – 1,17 mm Corta Cód. 20626 Promedio Cód. 18685 Larga Cód. 20619

SECUENCIA DE APLICACIÓN – ESCaneo EXTRAORAL

IMPLANTE	CICATRIZADOR/ PROVISIONAL	TRANSFER ANALÓGICO	ANÁLOGO D/Y	TRANSFER DIGITAL	COMPONENTE	INSTALACIÓN
Due Cone HE Veloce HE	Cicatrizador Ucla Titanio (Provisional) 30 Ncm	Transfer Moldeador Abierto Transfer Moldeador Cerrado 	Análogo HE 	Transfer Digital HE 	Base T 20 Ncm	Llave Hexagonal n.º 7 – 1,17 mm Corta Cód. 20626 Promedio Cód. 18685 Larga Cód. 20619

AR – Antirrotacional | D/Y – Digital o Yeso.


La Selección de componente para el Hexágono Externo debe seguir la misma plataforma que el implante instalado. Para implantes de Ø 3,3 y Ø 3,5, será de Ø 3,5; para implantes de Ø 3,75 y Ø 4,0, será de Ø 4,0 (Ø 4,1 Brånemark), como se muestra en la tabla "Plataforma Protésica" de la página 43.

*Para implantes HE Ø 3,3 y Ø 3,5 fabricados antes de oct. de 2015, componente especial con tornillo de 1,6 mm. Nueva línea Ø 3,3 y Ø 3,5 con tornillo de 1,8 mm.

PRÓTESIS ATORNILLADA

APLICACIÓN

- » Indicación para casos unitarios y múltiples;
- » Prótesis fijas y protocolos en general, especialmente en la región estética, donde la altura del tejido blando es mayor o igual 2 mm;
- » El conjunto del componente y los accesorios requiere una altura interoclusal aproximada de 6,3 mm, debiendo considerarse también el volumen metalocerámico según la planificación y ejecución protésica;
- » En casos unitarios, usar una secuencia antirrotacional;
- » El componente angulado de 17° o 30° permite corregir la angulación del implante en casos de prótesis múltiples;
- » El componente angulado no dispone de dispositivo antirrotacional y no debe realizar prótesis de tipo unitario;
- » Instalación Cónico Estético Recto: Llave Cónico Estético / Mini Cónico - n.º 5;
- » Instalación Transfer Cónico Estético Moldeador Cerrado: Llave Fricción n.º 3;
- » Par de instalación: 20 Ncm;
- » Par de instalación del casquillo: 10 Ncm.

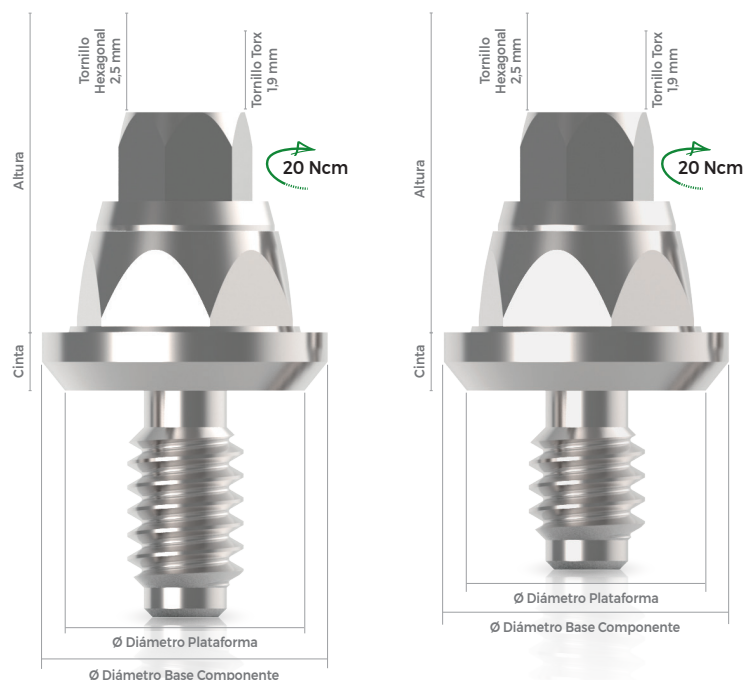

HE

	Plataforma	Ø 3,5	Ø 4,0	Ø 5,0
Cinta	1 mm	204132	2448	23108
	2 mm	204156	2455	2479
	3 mm	204170	2493	2486

Para implantes de 7 mm a 15 mm.
Diámetro del componente Ø 4,8 mm.

HE ST

Cinta	Ø Diámetro Plataforma
1 mm	214148
2 mm	214155
3 mm	214162

Para implantes de 5 mm a 6 mm.
Diámetro del componente Ø 4,8 mm.

SECUENCIA DE APLICACIÓN – UNITARIO

TIPO	INSTALACIÓN	CICATRIZADOR/PROVISIONAL	TRANSFER	ANÁLOGO D/Y	CASQUILLO	INSTALACIÓN CASQUILLO	REPOSICIÓN
Recto Unitario	Llave n.º 5 Cód. 18661	Tapa de Cicatrización Cód. 4732	Transfer Analógico Mold. Abierto Antirrotacional Cód. 4206	Antirrotacional Cód. 31517	Casquillo Base Cromo Antirrotacional (Laboratorio Analógico) Cód. 25265	Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm Corta Cód. 20626 Promedio Cód. 18685 Larga Cód. 20619	Tornillo Casquillo (Atornillado) Tornillo Hexagonal 1,17 mm Cód. 4763 Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm
	20 Ncm	Casquillo Titanio Antirrotacional (Provisional) Cód. 26802	Transfer Digital Antirrotacional Exocad® Cód. 30879		Casquillo Plástico Antirrotacional (Laboratorio Analógico) Cód. 4619	10 Ncm	Tornillo Torx T6 1,4x2,0 mm Cód. 30131 Llave Torx T6 Tornillo Trabajo Casquillo Cód. 24686 Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm

SECUENCIA DE APLICACIÓN – MÚLTIPLE

TIPO	INSTALACIÓN	CICATRIZADOR/PROVISIONAL	TRANSFER	ANÁLOGO D/Y	CASQUILLO	INSTALACIÓN CASQUILLO	REPOSICIÓN
Recto Múltiple	Llave n.º 5 Cód. 18661	Tapa de Cicatrización Cód. 4732	Transfer Analógico Mold. Abierto Rotacional Cód. 21623	Rotacional Cód. 31516	Casquillo Base Cromo Rotacional (Laboratorio Analógico) Cód. 27427	Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm Corta Cód. 20626 Promedio Cód. 18685 Larga Cód. 20619	Tornillo Casquillo (Atornillado) Tornillo Hexagonal 1,17 mm Cód. 4763 Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm
	20 Ncm	Casquillo Titanio Rotacional (Provisional) Cód. 21470	Transfer Analógico Mold. Cerrado Rotacional Cód. 4268		Casquillo Plástico Rotacional (Laboratorio Analógico) Cód. 4589	10 Ncm	Tornillo Torx T6 1,4x2,0 mm Cód. 30131 Llave Torx T6
Angulado Múltiple	Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm Corta Cód. 20626 Promedio Cód. 18685 Larga Cód. 20619		Transfer Digital Rotacional Exocad® Cód. 30785			20 Ncm	Tornillo Trabajo Casquillo Cód. 24709 Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm

AR – Antirrotacional | R – Rotacional | ST – Implantes de 5/6 mm | A = Atornillada / D/Y – Digital o Yeso.

La Selección de componente para el Hexágono Externo debe seguir la misma plataforma que el implante instalado. Para implantes de Ø 3,3 y Ø 3,5, será de Ø 3,5; para implantes de Ø 3,75 y Ø 4,0, será de Ø 4,0 (Ø 4,1 Brånemark); para Ø 4,75 y Ø 5,0, será de Ø 5,0, como se muestra en la tabla "Plataforma Protésica" de la página 43.
*Para implantes HE Ø 3,3 y Ø 3,5 fabricados antes de oct. de 2015, componente especial con tornillo de 1,6 mm. Nueva línea Ø 3,3 y Ø 3,5 con tornillo de 1,8 mm.
Casquillos plástico, Base Cromo y titanio vienen con tornillo hexagonal de 1,17 mm. El tornillo Torx debe adquirirse por separado.




CÓNICO ESTÉTICO ANGULADO

PRÓTESIS ATORNILLADA

APLICACIÓN

- » Indicación para casos múltiples;
- » El componente angulado de 17° o 30° permite corregir la angulación del implante en casos de prótesis múltiples;
- » Prótesis fijas y protocolos en general, especialmente en la región estética, donde la altura del tejido blando es mayor o igual a 3 mm para componentes de 17° y mayor o igual a 4 mm para componentes de 30°;
- » Usar secuencia rotacional para casos múltiples;
- » El componente angulado no dispone de dispositivo antirrotacional y no debe realizar prótesis de tipo unitario;
- » El conjunto del componente y los accesorios requiere una altura interoclusal aproximada de 6,3 mm, debiendo considerarse también la cinta de angulación, el volumen de la cinta de angulación y el volumen metalocerámico según la planificación y ejecución protésica;
- » Instalación Cónico Estético Angulado/Casquillo/ Tornillo del Transfer de Moldeador Abierto: Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm;
- » Instalación Transfer Cónico Estético Moldeador Cerrado: Llave Fricción n.º 3;
- » Par de instalación: 20 Ncm;
- » Par de instalación del casquillo: 10 Ncm.

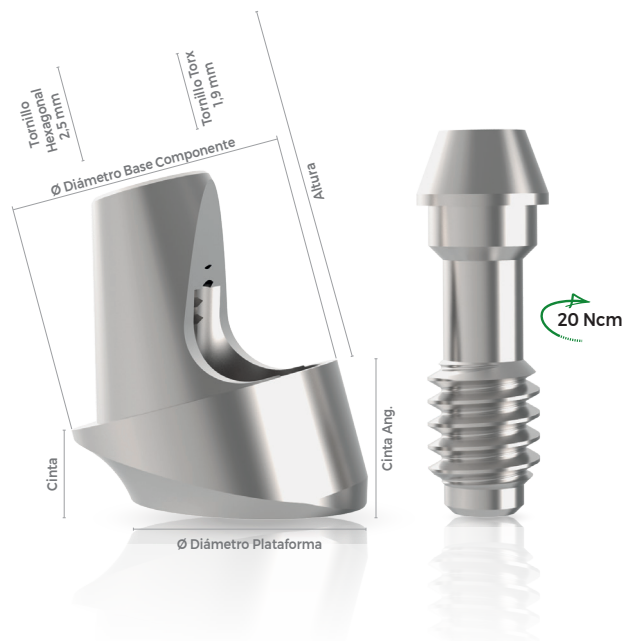

HE ANGULADO

	Ø Diámetro Plataforma	*Ø 3,5	Ø 4,0	Ø 5,0
Cinta	2 mm	204095	2523	5036
Cinta Ángulo 17°	2,5 mm			
Cinta	3 mm	204118	4930	5043
Cinta Ángulo 30°	3,2 mm			

Para implantes de 7 mm a 15 mm. Diámetro del componente Ø 4,8 mm.


SECUENCIA DE APLICACIÓN - MÚLTIPLE

TIPO	INSTALACIÓN	CICATRIZADOR/ PROVISIONAL	TRANSFER	ANÁLOGO D/Y	CASQUILLO	INSTALACIÓN CASQUILLO	REPOSICIÓN
Recto Múltiple	Llave n.º 5 Cód. 18661  20 Ncm	Tapa de Cicatrización Cód. 4732 	Transfer Analógico Mold. Abierto Rotacional Cód. 21623 	Rotacional Cód. 31516 	Casquillo Base Cromo Rotacional (Laboratorio Analógico) Cód. 27427 	Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm Corta Cód. 20626 Promedio Cód. 18685 Larga Cód. 20619  10 Ncm	Tornillo Casquillo (Atornillado) Tornillo Hexagonal 1,17 mm Cód. 4763 Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm  
Angulado Múltiple	Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm Corta Cód. 20626 Promedio Cód. 18685 Larga Cód. 20619  20 Ncm	Casquillo Titanio Rotacional (Provisional) Cód. 21470 	Transfer Analógico Mold. Cerrado Rotacional Cód. 4268  Transfer Digital Rotacional Exocad® Cód. 30785 		Casquillo Plástico Rotacional (Laboratorio Analógico) Cód. 4589 		Tornillo Torx T6 1,4x2,0 mm Cód. 30131 Llave Torx T6  Tornillo Trabajo Casquillo Cód. 24709 Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm 

La Selección de componente para el Hexágono Externo debe seguir la misma plataforma que el implante instalado. Para implantes de Ø 3,3 y Ø 3,5, será de Ø 3,5; para implantes de Ø 3,75 y Ø 4,0, será de Ø 4,0 (Ø 4,1 Brånemark); para Ø 4,75 y Ø 5,0, será de Ø 5,0, como se muestra en la tabla "Plataforma Protésica" de la página 43.
*Para implantes HE Ø 3,3 y Ø 3,5 fabricados antes de oct. de 2015, componente especial con tornillo de 1,6 mm. Nueva línea Ø 3,3 y Ø 3,5 con tornillo de 1,8 mm.
Casquillos plástico, Base Cromo y titanio vienen con tornillo hexagonal de 1,17 mm. El tornillo Torx debe adquirirse por separado.

APLICACIÓN

- » Indicación para casos múltiples;
- » Prótesis fijas y protocolos en general;
- » El conjunto del componente y los accesorios requiere una altura interoclusal aproximada de 4,8 mm, debiendo considerarse también el volumen metalocerámico según la planificación y ejecución protésica;
- » El componente angulado de 17° o 30° permite corregir la angulación de los implantes;
- » Instalación Mini Cónico Recto: Llave Cónico/Estético Mini Cónico - n.º 5;
- » Instalación Mini Cónico Angulado/ Casquillo/Tornillo del Transfer de Moldeador Abierto: Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm;
- » Instalación Transfer Mini Cónico Moldeador Cerrado: Llave Fricción n.º 3;
- » Par de instalación: 20 Ncm;
- » Par de instalación del casquillo: 10 Ncm.

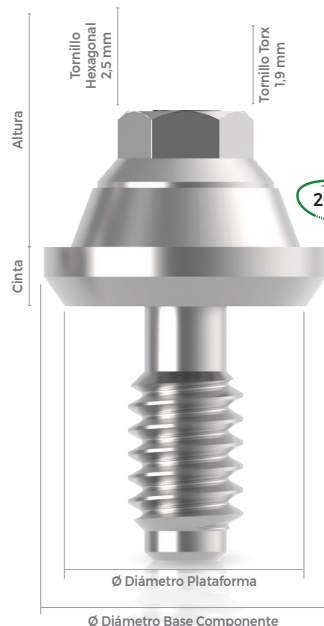

HE

Plataforma	*Ø 3,5	Ø 4,0	Ø 5,0
Cinta	1 mm	204439	2745
	2 mm	204453	2752
	3 mm	204477	2769

Para implantes de 7 mm a 15 mm.
Diámetro del componente Ø 4,8 mm.

HE ST

Cinta	Ø Diámetro Plataforma
1 mm	214001
2 mm	214018
3 mm	213998

Para implantes de 5 mm a 6 mm.
Diámetro del componente Ø 4,8 mm.

SECUENCIA DE APLICACIÓN


TIPO	INSTALACIÓN	CICATRIZACIÓN/ PROVISIONAL	TRANSFER ANALÓGICO	TRANSFER DIGITAL EXOCAD®	ANÁLOGO D/Y	CASQUILLO	INSTALACIÓN CASQUILLO	REPOSICIÓN
Recto Múltiple	Llave n.º 5 Promedio Cód. 18661  20 Ncm	Tapa de Cicatrización Cód. 18548 	Transfer Mold. Abierto Rotacional Cód. 13512 	Rotacional Cód. 30783 	Rotacional Cód. 30880 	Casquillo Base Cromo Rotacional (Laboratorio) Cód. 27434 10 Ncm 	Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm Corta Cód. 20626 Promedio Cód. 18685 Larga Cód. 20619  10 Ncm	Tornillo Casquillo (Atornillado) Tornillo Hexagonal 1,17 mm Cód. 4787 Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm 
	Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm Corta Cód. 20626 Promedio Cód. 18685 Larga Cód. 20619  20 Ncm	Casquillo Titanio Rotacional (Provisional) Cód. 18302 10 Ncm 	Transfer Mold. Cerrado Rotacional Cód. 4282 			Casquillo Plástico Rotacional (Laboratorio) Cód. 17749 10 Ncm 		Tornillo Torx T6 1,4x2,0 mm Cód. 30129 Llave Torx T6 
Angulado Múltiple						Pilar Base T Rotacional (CAD/CAM MetalFree) Cód. 25498 10 Ncm 		Tornillo Trabajo Casquillo Cód. 24686 Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm 

R - Rotacional | ST - Implantes de 5/6 mm | D/Y - Digital o Yeso.

La Selección de componente para el Hexágono Externo debe seguir la misma plataforma que el implante instalado. Para implantes de Ø 3,3 y Ø 3,5, será de Ø 3,5; para implantes de Ø 3,75 y Ø 4,0, será de Ø 4,0 (Ø 4,1 Brånemark); para Ø 4,75 y Ø 5,0, será de Ø 5,0, como se muestra en la tabla "Plataforma Protésica" de la página 43.
*Para implantes HE Ø 3,3 y Ø 3,5 fabricados antes de oct. de 2015, componente especial con tornillo de 1,6 mm. Nueva línea Ø 3,3 y Ø 3,5 con tornillo de 1,8 mm.
Casquillo titanio, casquillos plásticos, Base Cromo y Pilar digital Base T vienen con tornillo hexagonal de 1,17 mm. El tornillo Torx debe adquirirse por separado.

APLICACIÓN

- » Indicación para casos múltiples;
- » Prótesis fijas y protocolos en general;
- » El componente angulado de 17° o 30° permite corregir la angulación de los implantes;
- » El conjunto del componente y los accesorios requiere una altura interoclusal aproximada de 4,8 mm, debiendo considerarse también el volumen metalocerámico según la planificación y ejecución protésica;
- » La cinta de angulación también debe tenerse en cuenta en la planificación. Para componentes de 17°, considerar una cinta mínima de angulación de 2 mm y para 30°, cinta mínima de 3 mm;
- » Instalación Mini Cónico Angulado/Casquillo/Tornillo del Transfer de Moldeador Abierto: Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm;
- » Instalación Transfer Mini Cónico Moldeador Cerrado: Llave Fricción n.º 3;
- » Par de instalación: 20 Ncm;
- » Par de instalación del casquillo: 10 Ncm.

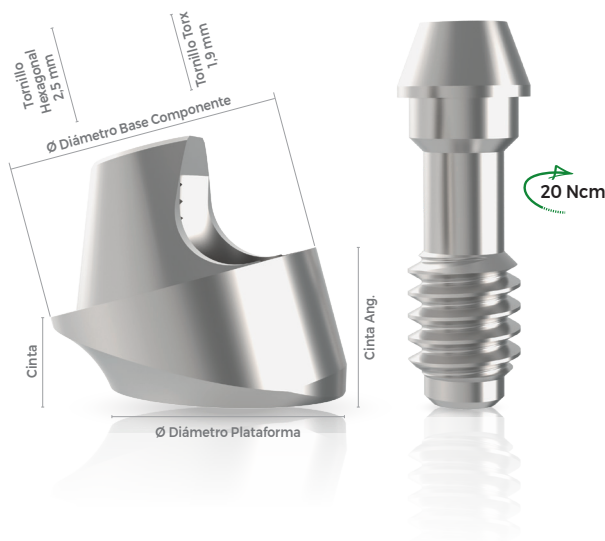

HE ANGULADO

Ø Diámetro Plataforma	*Ø 3,5	Ø 4,0	Ø 5,0
Cinta	2 mm	204392	20503
Cinta Ángulo 17°	2,5 mm		27083
Cinta	3 mm	204415	21951
Cinta Ángulo 30°	3,2 mm		21340

Para implantes de 7 mm a 15 mm. Diámetro del componente Ø 4,8 mm.

SECUENCIA DE APLICACIÓN

TIPO	INSTALACIÓN	CICATRIZACIÓN/PROVISIONAL	TRANSFER ANALÓGICO	TRANSFER DIGITAL EXOCAD®	ANÁLOGO D/Y	CASQUILLO	INSTALACIÓN CASQUILLO	REPOSICIÓN
Recto Múltiple	Llave n.º 5 Promedio Cód. 18661  20 Ncm	Tapa de Cicatrización Cód. 18548 	Transfer Mold. Abierto Rotacional Cód. 13512 	Rotacional Cód. 30783 	Rotacional Cód. 30880 	Casquillo Base Cromo Rotacional (Laboratorio) Cód. 27434  10 Ncm Casquillo Plástico Rotacional (Laboratorio) Cód. 17749  10 Ncm	Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm Corta Cód. 20626 Promedio Cód. 18685 Larga Cód. 20619  10 Ncm	Tornillo Casquillo (Atornillado) Tornillo Hexagonal 1,17 mm Cód. 4787 Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm  Tornillo Torx T6 1,4x2,0 mm Cód. 30129 Llave Torx T6 
Angulado Múltiple	Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm Corta Cód. 20626 Promedio Cód. 18685 Larga Cód. 20619  20 Ncm	Casquillo Titano Rotacional (Provisional) Cód. 18302  10 Ncm	Transfer Mold. Cerrado Rotacional Cód. 4282 			Pilar Base T Rotacional (CAD/CAM MetalFree) Cód. 25488  10 Ncm	 10 Ncm	Tornillo Trabajo Casquillo Cód. 24686 Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm 

R - Rotacional | ST - Implantes de 5/6 mm | D/Y - Digital o Yeso.

La Selección de componente para el Hexágono Externo debe seguir la misma plataforma que el implante instalado. Para implantes de Ø 3,3 y Ø 3,5, será de Ø 3,5; para implantes de Ø 3,75 y Ø 4,0, será de Ø 4,0 (Ø 4,1 Brånemark); para Ø 4,75 y Ø 5,0, será de Ø 5,0, como se muestra en la tabla "Plataforma Protésica" de la página 43.
*Para implantes HE Ø 3,3 y Ø 3,5 fabricados antes de oct. de 2015, componente especial con tornillo de 1,6 mm. Nueva línea Ø 3,3 y Ø 3,5 con tornillo de 1,8 mm.
Casquillo titano, casquillos plásticos, Base Cromo y Pilar digital Base T vienen con tornillo hexagonal de 1,17 mm. El tornillo Torx debe adquirirse por separado.