




CARACTERÍSTICAS

- » Implante cónico con encaje Cono Morse;
- » Rehabilitación inmediata o tardía;
- » Unitario/múltiple;
- » Instalación en cualquier densidad ósea: tipo I, II, III y IV*;
- » Superficie tratada con chorreado y grabado ácido alternados;
- » Doble sellado morse que permite mayor estabilidad y mayor sellado bacteriano del componente protésico;
- » Indexación que permite 12 posiciones;
- » Diseño revolucionario de las roscas trapezoidales acelera la condensación ósea, gracias a la perfecta combinación de la conicidad del implante y formato de las espiras;
- » Viene con cover 1 mm;
 - » Instalación: Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm;
- » Aplicación implante:
 - » Instalación del implante 2 mm infraóseo;
 - » Se necesita un perfil gingival superior a 1,5/2 mm;
- » Rotación:
 - » Perforación: 800-1.200 rpm;
 - » Instalación: 20 rpm;
- » Par para instalación sugerido de hasta 60 Ncm.

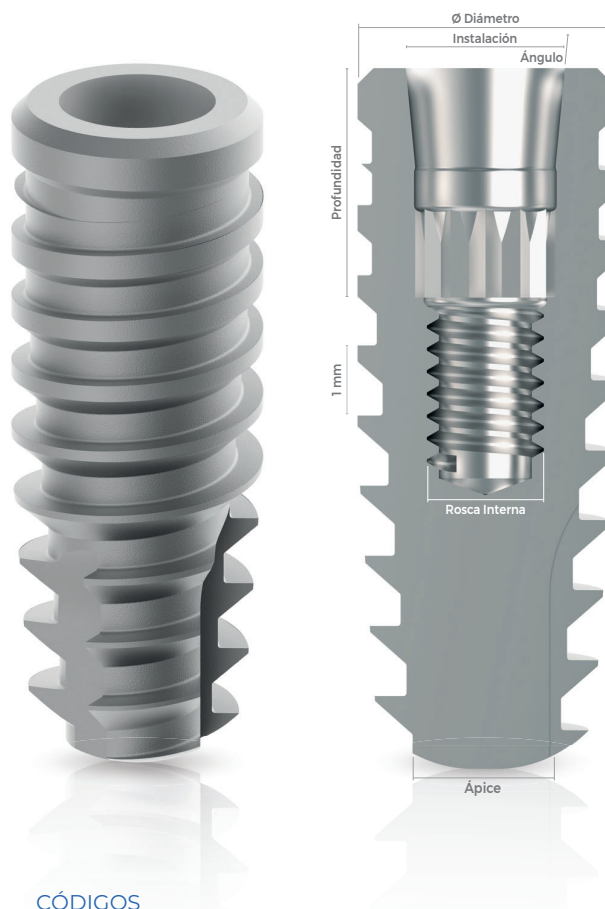

CÓDIGOS

Longitud	Código			
	Ø 3,5 mm	Ø 4,0 mm	Ø 4,5 mm	Ø 5,0 mm
7 mm	22274	222860	22298	24069
9 mm	22276	22288	22300	24071
11 mm	22278	22290	22302	24073
13 mm	22280	22292	22304	240758
15 mm	22282	22294	22306	24077
17 mm	22284	22296	-	-

ESPECIFICACIONES

Longitud	7 9 11 13 15 17 mm			
Diámetro	3,5 mm	4,0 mm	4,5 mm	5,0 mm
Ápice	2,0 mm	2,8 mm	3,0 mm	3,5 mm
Profundidad	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm
Rosca Interna	1,8 mm	1,8 mm	1,8 mm	1,8 mm
Instalación	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Ángulo	11,5°	11,5°	11,5°	11,5°

LLAVES INSTALACIÓN




Para implantes Ø 3,5/3,5/4,0/5,0.



COVER/ TAPA IMPLANTE

0 mm (adicional)	34519
1 mm (viene con)	34521
2 mm (adicional)	34522

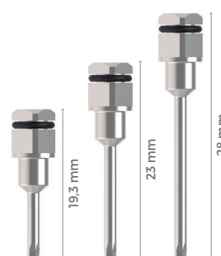

LLAVE PARA INSTALACIÓN COVER

Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm		
Clave Corta	19,3 mm	20626
Clave Promedio	23 mm	18685
Llave Larga	28 mm	20619


*Indicación de aplicación ósea según la Clasificación de Lekholm y Zarb. Para realizar la preparación del lecho para implantes cónicos, se debe usar la fresa correspondiente a la longitud del implante previsto, respetando la secuencia ilustrada, según el tipo de hueso.

SECUENCIA DE FRESAS

											
	Tipo óseo	Implante Ø Diámetro	LH Ø 2,0	FC Ø 3,0	FC Ø 3,5	ES Ø 3,5	FC Ø 4,0	ES Ø 4,0	FC Ø 4,5	FC Ø 5,0	ES Ø 5,0
FRESADO	I	Ø 3,5	▲		▲						
		Ø 4,0	▲		▲		▲				
	II	Ø 4,5	▲		▲		▲		▲		
		Ø 5,0	▲		▲		▲		▲	▲	
SUBFRESADO	III	Ø 3,5	▲	▲							
		Ø 4,0	▲		▲						
	IV	Ø 4,5	▲		▲		▲				
		Ø 5,0	▲		▲		▲		▲		
OSEODENSIFICACIÓN	III	Ø 3,5	▲			▲					
		Ø 4,0	▲		▲			▲			
	IV	Ø 4,5	▲		▲		▲				
		Ø 5,0	▲		▲		▲		▲		▲

LH - Fresa Lanza Helicoidal | FC - Fresa Cónica | ES - Escariador/oseodensificador

DENSIDAD ÓSEA

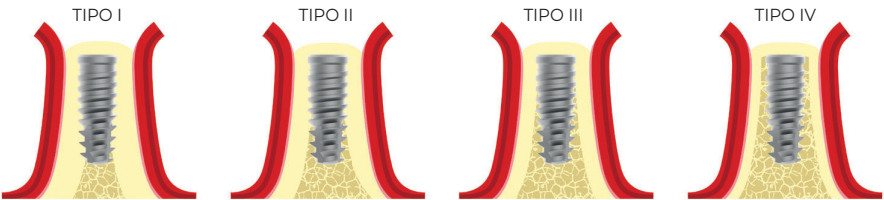

APLICACIÓN

Carga inmediata	Par: 35 Ncm mínimo / 60 Ncm máximo.	Finalización tras la osteointegración. Tiempo mínimo: 12 semanas.
Carga tardía	Par sugerido: 60 Ncm.	

DATOS TÉCNICOS

